

medaxis

debritom⁺

Technique de micro-jet d'eau

Nebbia

L'aide pratique pour le débridement



swiss medical technology

Nebbia

Débridement par micro-jet d'eau - conteneur des aérosols grâce au Nebbia

AeroGuard Nebbia

Utilisation sur les extrémités

- Le degré le plus élevé de confinement des Aérosols
- Élimination des déchets simple et peu encombrante
- Protection contre la contamination
- Unité d'emballage de 20 pièces



No d'article: 2000.2003

Application



Déballez et dépliez l'AeroGuard „Nebbia“



Placez AeroGuard „Nebbia“ sur l'extrémité



Fermez hermétiquement l'Aero-Guard „Nebbia“ à l'extrémité ouverte à l'aide d'une bande d'étanchéité. Ne serrez pas la band trop fort!



Cliquez la pièce à main debritom* dans le passage de la pièce à main



Débridez la plaie conformément au mode d'emploi du debritom*



Ouvrez la bande de fermeture après le débridement