

# medaxis

## debritom<sup>+</sup>

Mikrowasserstrahl-Technologie

### Nebbia

Der praktische Helfer beim debridieren



swiss medical technology

# Nebbia

## Mikrowasserstrahl Debridement - Eindämmung der Aerosole dank dem Nebbia

### AeroGuard Nebbia

#### Für den Einsatz an Extremitäten

- Hoher Eindämmungsgrad von Aerosolen
- Einfache und platzsparende Entsorgung
- Schutz vor Kontamination
- Verpackungseinheit 20 Stk.



### Anwendung



AeroGuard «Nebbia» auspacken und entfalten



AeroGuard «Nebbia» über Extremität stülpen



AeroGuard «Nebbia» am offenen Ende mittels Verschlussband dicht verschliessen. Band nicht zu eng anziehen!



debritom<sup>+</sup> Handstück in Handstückdurchgang einklicken



Wunde gemäss der Bedienungsanleitung debritom<sup>+</sup> behandeln



Nach Debridement Verschlussband öffnen